



HÜNKAR
ECZA VE MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

NEBULİZER SET
Yetişkin
NEBULİZER SET
Adult

REF 099-131

LOT 1270214

2019.09



1984



UYARILAR

- 1- Yırtılmış zarar görmüş paketleri kullanmayınız. Tek kişi kullanımına uygundur.
- 2- Güneş ışığında, yüksek sıcaklıkta ve nemli ortamlarda saklamayınız.
- 3- Bu ürün ftalat ve latex içermez.

KULLANMA TALİMATI

- 1- Hava hortumunun bir ucunu, kullanacağınız nebülizatör cihazının üzerindeki hava çıkış deliğine takınız.
- 2- Hava hortumunun diğer ucunu, ilaç kabının altında yer alan hava deliğine takınız.
- 3- İlaç kabı kapağını saat yönünün tersine çevirip yukarı çekerek ilaç kabından çıkarınız.
- 4- İlaç haznesine, doktorunuzun belirlemiş olduğu miktarda ve türde ilacı koyunuz.
- 5- Buharlaştırıcı parçayı ilaç kabı kapağının altındaki yere, tırnakları oturacak şekilde yerleştiriniz.
- 6- İlaç kabının kapağını ilaç haznesine yerleştirin, saat yönünde çevirerek kapandığından emin olun.
- 7- Maskeyi ilaç kabının üzerindeki deliğe takın. Cihazı çalıştırıp, buhar çıkışının olduğundan emin olun.
- 8- Maskeyi ağız ve burnunuzu kaplayacak şekilde takın. Normal nefes almaya devam edin.
- 9- İlaç kabı kapağı üzerindeki nebülizasyon ayar vanasını kullanarak istenilen buhar çıkışını ayarlayın.

CAUTION

- 1- Do not use damaged package. Suitable for single.person use.
- 2- Do not stock in high temperature, sun shining and moisture place.
- 3- There is not ftalat and latex in this product.

INSTRUCTION FOR USE

- 1- Install the air-tube to air out hole on the device.
- 2- Install the other edge of air-tube to down side of medication cup.
- 3- Turn the medication cup lid reverse of clockwise and pull up and take out it.
- 4- Put the right type and amount of medication in to medication cup as your doctor advised to you.
- 5- Place the vaporiser head under the lid of the medication cup so that the tabs engage.
- 6- Put the medication cup on its place and turn clockwise the lid to close it
- 7- Install the mask on to the medication cup. Operate the device, Be sure aerosol is coming from medication cup.
- 8- Wear the mask to cover your mouth and nose. Keep breathing normally.
- 9- Adjust the desired aerosol output using the nebulization control valve located on the lid of the medication cup.

Paket İçeriği= Yetişkin Maske, Maske Hortumu, Nebulizer İlaç Kabı

Package Contents = Adult Mask, Air Tube, Nebulizer Medication Cup



Hünkar Ecza ve Medikal San. Tic. Ltd. Şti.

Akçeşme Mah. 2019 Sk. No:5 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel: +90 258 371 46 56 Fax: +90 258 372 06 81

www.hunkarmedikal.com

MADE IN TÜRKİYE

Rev. Tarihi/Rev. Date 30.11.2020 Rev05