



Hızlı Kullanım Rehberi Quick User Guide

TAŞINABİLİR MESH NEBULİZATÖR
PORTABLE MESH NEBULIZER

HNK-MESH-01


MADE IN
TURKEY




1) KULLANIM TALİMATLARI-OPERATING INSTRUCTIONS



- İlaç kabı kapağını saat yönünün tersine çevirerek açınız.
- Rotate anticlockwise to open the medication cup cap according to the arrow mark.

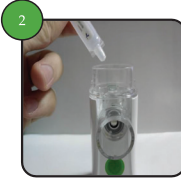

- İlaç kabına ilacı koyunuz. Lütfen ilaç kabının maksimum kapasitesini geçmeyiniz.
- Add proper medication. Please do not exceed the max. scale indication.

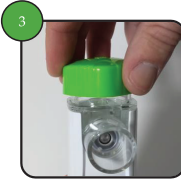

- İlaç kabı kapağını saat yönünün de çevirerek kapatınız.
- Tighten the cup cap clockwise.



- Cihaz üzerine maske veya ağızlığı takınız.
- Connect mask or mouthpiece.



- Güç düğmesine basarak nebulizasyon işlemi başlatınız.
- Start the nebulization by pressing the power button.



HÜNKAR
ECZA VE MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hünkar Ecza ve Medikal Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mah. 2019 Sok. No:5 Merkezefendi/Denizli/TÜRKİYE
Tel.: +90 258 371 46 56

www.hunkarmedikal.com

UYARI-WARNING

1

- Lütfen tedavi boyunca, ilaç seçiminde ve ilaç kullanımı sırasında doktor tavsiyesine uyunuz.
- Please follow doctor's advice on medication selection, medication usage and treatment time.

2

- Lütfen nebulizasyon için yağlı maddeleri kullanmayın.
- Please do not use oil substances for nebulization.

3


- Lütfen her kullanımdan sonra cihaz temizliğini ve bakımını yapınız.
- Please clean and maintain the device after each time use.

4

- Lütfen her kullanımdan sonra cihaz ilaç kabı ve aksesuarlarını kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
- Please keep the device, medication cup and accessories dry after each time.

5

- Lütfen kesici, delici, pamuklu nesnelere ve el ile cihazın mesh kısmına dokunmayınız.
- Please do not touch the mesh with sharp, cottony or hard objects or with figure in case of malfunction.

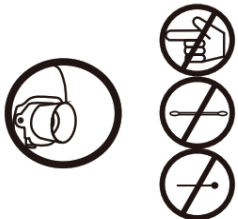

2) TEMİZLİK TALİMATLARI-CLEANING INSTRUCTIONS

1



- Cihaz üzerindeki aksesuarları çıkarınız.
- Remove any accessories on the device.

2



- İlaç kabı kapağını açın ve ilaç kabında kalan ilacı boşaltınız.
- Open the medication cup cover and clean the medication residue.

3



- İlaç kabına sıcaklığı 40 °C'den fazla olmayacak şekilde ılık kaynatılmış su koyunuz.
- Add appropriate amount of warm water (Below 40 °C). Please do not use distilled water or multiple-filtered purified water.

4



- Güç düğmesine basarak nebulizasyon işlemi başlatınız. En az 1 dk. boyunca cihazı çalıştırarak mesh kısmının temizlemesini sağlayınız.
- Start the nebulization by pressing the power button. Allow the cleaning of the mesh part by running the device for at least 1 minute.

5



- İlaç kabını cihazın arkasındaki PRESS butonuna basarak yukarı doğru çıkarınız.
- Hold down the press key and pull up the medication cup.

6



- İlaç kabının iç kısmını yıkayınız.
- Clean the internal of medication cup.



- İlaç kabının dış kısmını yıkayınız.
- Clean the exterior of medication cup.



- İlaç kabı konektörünün iç kısmını yıkayınız.
- Clean the internal of the spaying connecting interface.

- İlaç kabı temizliğini tamamladıktan sonra cihazı temiz bir gazlı bez ile siliniz. Mesh üzerine asla doğrudan su dökmeyiniz.
- Please wipe the machine with clean medical gauze after medication cup cleaning. Never pour water directly onto the mesh.

- ! Lütfen temizlik esnasında kullanılan su sıcaklığının max. 40 °C olacağını unutmayınız.
- ! Mesh kısmı temizliği esnasında su içerisine 2-3 damla beyaz sirke koyarak nebulizasyon işlemi başlatmanız tavsiye edilir. Beyaz sirke mesh gözeneklerin daha iyi temizlenmesini sağlayacaktır.
- ! Lütfen tüm parçaların tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra saklama çantası içerisine yerleştiriniz.
- ! Please note that the max. water temperature used during cleaning is 40 °C.
- ! Nebulization with 1 drop purified water and 3 drops white vinegar will achieve better cleaning effect.
- ! Please insert into the storage bag after making sure that all parts are completely dry.