



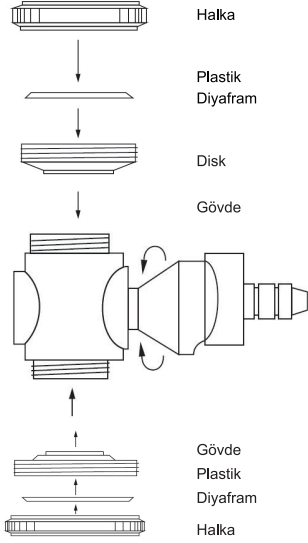




Kafa basarak 180 derece
dönebilir

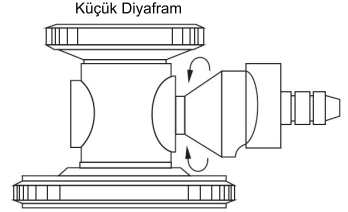

Büyük Ebat

Orta Ebat

Küçük Ebat

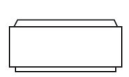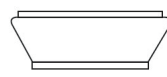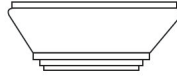

正反面印刷，折叠页，145*100mm

Steteskop ile Birlikte Kullanılan Diğer Parçalar Ve Adet Listesi

1. Göğüs dinlemek için büyük ve küçük diyaframlar -----1adet.
2. Yumuşak, altı krom kaplı kaliteli kulaklıklar -----1çift
3. Metal klibli ağır borular -----1çift
4. Değiştirilebilir başlı göğüs dinleme aygıtı, büyük ebat -----1adet.
5. Değiştirilebilir başlı göğüs dinleme aygıtı, orta ebat -----1adet.
6. Değiştirilebilir başlı göğüs dinleme aygıtı, küçük ebat -----1 adet.
7. Kulaklık, büyük ve küçük ebatlarda -----2çift
8. Transparant plastic diyaframlar, büyük ve küçük ebatlarda -----2adet.
9. Parçalar için plastik taşıma çantası -----1adet.

ÖZELLİKLERİ

5-DEĞİŞİK ŞEKİLDE KULLANILABİLİR

5 farklı steteskopun yapabileceği değişik ölçümleri tek bir steteskopta toplayarak 5 farklı ölçümü tek steteskopta yapabile.

Göğüs ölçme aygıtının başlık kısmı 3 farklı ebatlarda dizayn edilmiş olup, 2 adet büyük ve küçük ebatlarda diyafram eklenerek set tamamlanmıştır.

Bu yüzden her bir diyafram yada başlık uyumlu şekilde kullanılabilir.

- ① **BÜYÜK DİYAFRAM:** Genel olarak göğüste kalp atışlarını ve kalbin düşük frekansta olan seslerini, diastolik ve birinci ve ikinci kalp atışları ile birlikte üçüncü kalp atışını duymak içinde kullanılır. Ayrıca kalpte yer alan yüksek hırıltılar da duymak mümkündür.
- ② **KÜÇÜK DİYAFRAM:** Kalpteki küçük atışların seslerini duymak için kullanılır.
- ③ **ORTA DİYAFRAM:** Düşük ve orta seviyedeki sesleri duymak için kullanılır.
- ④ **ORTA EBATLI BAŞLIK:** Kaburga boşluğundaki veya onun etrafında yer alan küçük bölgelerdeki düşük ve orta seviyedeki ses ve hırıltıları duymak için kullanılır.

- ⑤ **INFANT EBATLI BAŞLIK:** Bebeklerde ve çocuklarda kullanılır. Bebeklerin kalbinden gelen düşük veya orta seviyeli sesleri ve hırıltıları en iyi şekilde duymanızı sağlar.

Tüm bu parçalar yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş olup, kalpte yer alan en düşük frekans bile kolay ve kaliteli şekilde duymanız için üretilmiştir. Ayrıca kulaklıklar rahat ve konforlu kullanım için 3 farklı ebatlarda üretilmiştir.

Tüm aparatlar; 3 adet başlı göğüs dinleme aygıtı 2 adet büyük ve küçük ebatlardaki plastic diyaframlar tek bir küçük taşıma çantasında taşınabilir.

KULLANIMI

RAPPAPORT TIP çift başlı ve kolayca yerleştirilebilen büyük ve küçük ebatlardaki plastic diyaframlarla, çift başlı gövde ve sızınıtı yapmayan yüksek kaliteli valflerle üretilmiştir.

- Öncelikle binauraleri kulağınıza takın.
- Diyaframın yumuşak tarafını parmağınızla birlikte dinleme yapacağınız yere koyun.
- Eğer vuruş sesi duymıyorsanız başlığı 180 derece ters yönde çevirin.
- Daha sonra bir kez vurun, vurduktan sonra vuruş sesini duyabilirsiniz.
- Aletlerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini steteskop ile birlikte kontrol edebilirsiniz.
- Aynı prosedürleri diğer başka göğüs ölçme aygıtlarını kullanmak içinde uygulayabilirsiniz.

İthalatçı(Importer): Hünkar Ecza ve Medikal Ltd.Şti.
Akçeşme Mah 2019 sok.No:5 Denizli/TÜRKİYE
Tel:+902583714656 www.hunkarmedikal.com